

neodisher[®] AN

Détergent poudre faiblement alcalin



Principaux domaines d'utilisation :

Propriétés :

Lavage mécanique d'ustensiles d'anesthésie et de médecine intensive.

neodisher AN, avec ses enzymes protéolytiques élimine, en relation avec les additifs de lavage actifs faiblement alcalins, les résidus de sang, de protéine, de mucus, de tissus et de crachats.

Les matériaux thermostables peuvent être soumis à la désinfection thermique avec neodisher AN.

Pour le traitement du matériel thermolabile, effectuer une désinfection chimio-thermique à 60° C en combinaison avec le désinfectant neodisher Septo DA en autolaveur ou en machine à thermo désinfecteur.

Utilisation et dosage :

3 – 4 g/l dans le doseur ou en manuel.

Pour éliminer les résidus de sang, d'albumine, de mucus, de cellules et de crachats sur les ustensiles d'anesthésie :

Lavage : mettre 3 g/l neodisher AN directement dans la machine

Désinfection thermique : 95° C, 10 minutes de temps de contact

Désinfection thermo chimique : 10 g/l neodisher Septo DA, 60° C, 5 minutes de temps de contact

Neutralisation : 1 ml/l neodisher Z au premier rinçage, ensuite rinçage normal.

S'assurer d'un rinçage complet en machine (de préférence eau déminéralisée). Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Données techniques :

Poids spécifique : 1075 – 1125 g/l

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,3 – 0,4 % : 11,2 – 11,8

Facteur de titrage : 0,96 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Selon la recommandation européenne :

< 5 % tensioactifs non ioniques

> 30 % phosphates

Enzymes

Marquage CE :

neodisher AN est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

Stockage :

Craint la chaleur et l'humidité. Bien refermer après utilisation. 1 an au frais selon les indications de stockage

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes :

Symbole de danger Xi - irritant

Indications de risques :

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

Consignes de sécurité :

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 37 Porter des gants de protection appropriés.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche technique.

Conditionnement :

Seau de 10 kg

FT 4104/1 - 2

03/03



Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail -BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr -

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.